

Dokumentbrugere:	Dokument ID:	Forfatter:	Udgivelsesdato:
SHS Bio/Im	1105650	Anne Lindegaard Christiansen	08.12.2025
Læseadgang:	Niveau:	Dokumentansvarlig:	Version:
Alle	Instruks	SHS/Bio/Im AL	1.1
			Godkendt af:
			Thor Aage Skovsted

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Koriogonadotropin beta, Doubletest;P

Nyoprettet

	Koriogonadotropin beta,Doubletest;P			
LabTerms kort helterm (enhed)	P—Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551;proc.), (IU/L)			
NPU kode / kvantitet	NPU01580 / 002356			
Forkortelse og synonymer	HCGBETA, frit-beta-HCG			
Instruktion for rekvirent	HCGBETA kan ikke rekvireres som enkeltanalyse. HCGBETA indgår i gruppen 'Doubletest gruppe;Foster' (rekvireringsgruppe 500209) sammen med PAPP (PAPP A;P) (kvantitet 004251). Se <i>Doubletest gruppe;Foster Dok ID: 956036</i> og analysen NPU22157 PAPP A;P. Prøven tages i graviditetsuge 8+0 til 13+6 ¹			
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5		
	Minimumsvolumen	1000 µl serum (Kryptor)		
	Transportordning (Praksis)	JA		
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer ved 21 °C		
	Holdbarhed efter centrifugering (afpipetteres ved track og kommer på frys til analysering) ved	21°C	8 timer ²	
		4°C	24 timer ²	
		-20°C	6 år ²	
Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed.			
Svarafgivelse	Analysen udføres dagligt på hverdage			
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed			
Referenceinterval				
Klinisk information	Måling af biomarkørerne PAPP og HCGBETA (frit-beta-HCG) udgør sammen med måling af fosterets nakkefold første trimester screeningen for Downs syndrom og trisomi 13 og 18 ¹ . Risikoberegning udføres med programmet ASTRAIA, når ultralydsscanning er udført.			
Variation på analyseresultater	Mål for CV% ≤ 3% Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 36 IU/L, CV% 2,9% Niveau ~ 71 IU/L, CV% 2,6% Niveau ~ 139 IU/L, CV% 3,5%			
Biologisk variation	Ej relevant			

Referencer	1. Sundhed.dk. Doubletest. Tilgået 17/12-2024. 2. Kit insert; B.R.A.H.M.S Free beta hCG KRYPTOR, HN-CUS-3020 version R31.1da (Kryptor).
------------	--

 Version	Godkendt	Revisionsinformation
1.1	08.12.2025	Ændret holdbarhed på fuldblod til 10 timer v 21 gr C
1	18.02.2025	Nyoprettet dokument