

Dokumentbrugere:	Dokument ID:	Forfatter:	Udgivelsesdato:
SHS Bio/Im	956326	Hanne Davidsen	08.12.2025
Læseadgang:	Niveau:	Dokumentansvarlig:	Version:
Alle	Instruks	SHS/Bio/Im AL	1.2
			Godkendt af:
			Anne Lindegaard Christiansen

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.



Thyroidperoxidase-Ab;P

	Thyroidperoxidase-Ab;P	
LabTerms kort helterm, (enhed)	P-Iodidperoxidase-antistof; arb.stofk.(IRP 66/387;proc.), (10 ³ IU/L)	
NPU kode / kvantitet	NPU20041 / 001828	
Forkortelse og synonymer	TPOAB, Anti-TPO, TPO	
Instruktion for rekvirent	Ingen særlige hensyn	
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5
	Minimumsvolumen	300 µL serum (Kryptor)
	Transportordning (Praksis)	JA
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer ved 21 °C
	Holdbarhed efter centrifugering (afpipetteres ved track og kommer på frys til analysering) ved	21°C 8 timer (med prop) ¹
		4°C 24 timer (med prop) ¹
		-20°C 1 måned ¹
	Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed
Svarafgivelse	Udføres dagligt på hverdage	
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed	
Referenceinterval	< 11 x 10 ³ IU/L	
Klinisk information	Analysen anvendes til påvisning af autoimmun betinget hypothyreose. Anti-TPO anvendes til diagnostik, ikke til monitorering af behandling, da korrelationen til sygdomsaktiviteten er dårlig ² .	
Variation på analyseresultater	Mål for CV% ≤ 7% Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 9,0 10 ³ IU/L, CV% 3,0% Niveau ~ 17,2 10 ³ IU/L, CV% 2,0%	
Biologisk variation	Biologisk intraindividuel variation 11,3% ³	
Referencer	1. Kit insert; B.R.A.H.M.S anti-TPOn KRYPTOR, HN-CUS-2861 V. R18.1da (Kryptor). 2. Sundhed.dk. Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg). Tilgået 18/11-24 3. Westgard, Biological Variation database (tilgået 17/12-2024)	

 Version	Godkendt	Revisionsinformation
1.2	08.12.2025	Holdbarhed på fuldblod ændret til 10 timer v 21 gr C
1.1	14.01.2025	Ændret revisionsdato til 36 mdr. og ikke dato
1	06.01.2025	Nyoprettet