

Analysenavn	Pt(F)—Alifatisk carboxylat(C ₁₄ -C ₂₆)+estre; stofhast.
Kortnavn	Alifatisk carboxylat;Pt(F)
Synonym	ALIF
Forkortelse	ALC-F
IUPAC kode	NPU-1140
Kvantitetsnummer	500235
Instruktion for rekvirent	<p>Analyseres ugentligt Opsamlings sættet består af en papkasse indeholdende:</p> <p>3 hvide opsamlingsbeholdere med skruelåg, som hver indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 gennemsigtigt inderlåg - 1 plastpose (frysepose) <p>Et plastchartek indeholdende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 patientvejledning - 3 metaltråde - 10 opsamlingspapirer <p>3 SAFETYBAG Rekvissionssedler</p> <p>Opsamlings sættet rekvireres på sygehusets centraldepot, som rekvirerer det via ILS.</p>
Præanalytiske forhold	<p>Patienten må fra to dage før undersøgelsen ikke indtage følgende:</p> <p>Hørfrø Amerikansk olie Paraffinolie Afføringsmiddel</p> <p>Hvis patienten har fået foretaget røntgenundersøgelse med kontrast, skal der gå mindst 5 dage, før man kan påbegynde opsamlingen.</p>
Prøvemateriale	Fæces fra 3 døgn.
Prøvetagning	<p>Opsamlingen bør ske indenfor 4 døgn. Fæces opsamles i plastpose i plastspand over 3 døgn. Alt materiale sendes til Blodprøver, Biokemi og Immunologi, SHS Aabenraa.</p>
Beslutningsgrænse	25 mmol/d
Analyseusikkerhed	12 %

Unormale værdier

Værdier over beslutningsgrænse støtter mistanke om malabsorption.

Bemærkninger

Hvis totalmængden af fæces er under 100 g, udføres der ikke en kvantitativ bestemmelse af fedtindholdet i fæces, dog udføres en visuel bedømmelse. Se i øvrigt [Carboxylater pjecen](#)

Seneste opdatering 21.01.2021