

Dokumentbrugere: SHS Bio/Im	Dokument ID: 1174481	Forfatter: Anne Lindegaard Christiansen	Udgivelsesdato: 01.12.2025
Læseadgang: Alle	Niveau: Instruks	Dokumentansvarlig: SHS/Bio/Im AL	Version: 1
			Godkendt af: Thor Aage Skovsted

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Alifatisk carboxylat gruppe;Pt(F)

	Alifatisk carboxylat gruppe;Pt(F)	
LabTerms kort helterm, (enhed)	Gruppen indeholder: NPU01140: Pt(F)—Alifatisk carboxylat(C ₁₄ -C ₂₆)+estre; stofhast.(proc.), (mmol/d) NPU10221: Pt-Fæces;mass(proc.) (g) NPU53949: F-Alifatisk carboxylat(C ₁₄ -C ₂₆); stofindh. (mol/kg)	
NPU kode / kvantitet	Gruppen: RSD00407 / 500235. Enkelte parametre: NPU01140 / 000076; Alifatisk carboxylat (C14-26);Pt(F) NPU10221 / 000682; Fæces masse;Pt NPU53949 / 004730; Alifatisk carboxylat (C14-26);F	
Forkortelse og synonymer	ALC-F, ALIF, fedt i fæces	
Instruktion for rekvirent	Rekvirering af opsamlingssæt i Region Syddanmark Rekvirering af opsamlingssæt <u>uden for</u> Region Syddanmark Opsamlingssæt, der udleveres til patienten indeholder: - patientvejledning - 3 metaltråde - 10 opsamlingspapirer - 3 hvide opsamlingsbeholdere med skruelåg, som hver indeholder: - 1 gennemsigtigt inder låg - 1 plastpose (frysepose) - 3 sikkerhedsposer - rekvisitionssedler: BCC rekvisition til <u>hver</u> enkelt døgnopsamling VIGTIGT: Opsamlinger fra samme <u>døgn</u> skal mærkes med samme PMB nummer. OBS - op til 2 dage før undersøgelsen må patienten ikke indtage følgende: Hørfrø Amerikansk olie Paraffinolie Afføringsmiddel Hvis patienten har fået foretaget røntgenundersøgelse med kontrast, skal der gå mindst 5 dage, før man kan påbegynde opsamlingen.	
Prøvemateriale	Prøverør	Specielle opsamlingssæt til ALC-F - se 'instruktion for rekvirent'
	Minimumsvolumen	Fæces fra 3 døgn
	Transportordning (Praksis)	JA

	Holdbarhed (betingelser under opsamling/forsendelse)	Opbevaring under opsamling: Køligt Opbevaring under forsendelse: Omgivelsestemperatur	
	Holdbarhed	21°C	10 dage
		4°C	20 dage
		-20°C	1 år
	Postforsendelse	Ja	
Svarafgivelse	Analyseres 1 gang pr måned		
Efterbestilling	Ikke relevant		
Referenceinterval	< 25 mmol/d ¹		
Klinisk information	Værdier over beslutningsgrænse støtter mistanke om malabsorption. Hvis totalmængden af fæces er under 100 g, udføres der ikke en kvantitativ bestemmelse af fedtindholdet i fæces.		
Variation på analyseresultater	Mål for (højt niveau) CV% ≤ 11,25% Intern kontrol i rutinedrift: Niveau (højt) ~ 226 mmol/døgn, CV 6,5% Niveau (lavt) ~ 5 mmol/døgn, CV 11,9%		
Biologisk variation	Ikke relevant		
Referencer	1. BBI. Egen undersøgelse		

	Version	Godkendt	Revisionsinformation
	1	01.12.2025	Øget 'svarafgivelsen' fra '1 gang pr uge' til '1 gang pr måned'. Samt lidt sproglige ændringer.