

Til: Almen praksis i Sygehus Sønderjyllands optageområde

Vedr.: Øget opmærksomhed på mærkning af blodprøveglas

I forbindelse med implementeringen af helt nyt automatiseringssystem på BBI Sønderborg, vil vi i perioden den 15.06.2026 – 30.08.2027 skulle håndtere samtlige prøver manuelt på vores analyseinstrumenter.

Vi har dog et mindre sorteringsudstyr, som kan hjælpe os med en udsortering, hvorefter håndteringen til analyseinstrumenterne foretages manuelt.

For at dette mindre sorteringsudstyr skal fungere efter hensigten, kræver det en øget opmærksomhed på mærkningen af blodprøveglas i praksis.

Disse ting skal man være meget opmærksom på:

- Propperne må **ALDRIG** tages af blodprøveglassene. Hvis propperne har været taget af blodprøveglassene, så risikerer vi at de vil falde af i sorteringsudstyret, hvorefter vi skal foretage en omfattende rengøring – og analysesvar på alle indsendte prøver forsinkes væsentligt, og der vil ikke komme svar på det pågældende blodprøveglas.
- Etiketterne **SKAL** placeres ovenpå de etiketter, der allerede sidder på blodprøveglassene.
- Etiketterne **SKAL** sættes så langt op mod proppen som muligt.
- Der må **ALDRIG** sættes 2 etiketter på et blodprøveglas. Hvis det eksempelvis ikke lykkes at fylde begge blodprøveglas med samme proppfarve, så skal følgende procedure anvendes:
 - Begge glas samles med en elastik og de sendes sammen med prøvetagningsblanketten til BBI.

Kontakt laboratoriet, hvis der er spørgsmål.

Med venlig hilsen

Morten Andersen
Bioanalytikerspecialist, BBI
Sygehus Sønderjylland
Tlf.nr.: 23671587 / 79974613

Sarah Fogt Hansen
Bioanalytikerspecialist, BBI
Sygehus Sønderjylland
Tlf.nr.: 79974727 / 24247054

Lise Bjørklund
Laboratoriekonsulent
Sygehus Sønderjylland
Tlf.nr.: 29316140