

Dokumentbrugere: SHS Bio/Im	Dokument ID: 1109979	Forfatter: Anne Lindegaard Christiansen	Udgivelsesdato: 08.12.2025
Læseadgang: Alle	Niveau: Instruks	Dokumentansvarlig: SHS/Bio/Im AL	Version: 1.1
			Godkendt af: Thor Aage Skovsted

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

PAPP A;P

Nyoprettet

	PAPP A;P		
LabTerms kort helterm (enhed)	P—Pregnancy-associated plasma protein A; arb.stofk. (proc.) (IU/L)		
NPU kode / kvantitet	NPU22157 / 004251		
Forkortelse og synonymer	PAPP A, PAPPA		
Instruktion for rekvirent	PAPP A kan ikke rekvireres som enkeltanalyse. PAPP A indgår i gruppen 'Doubletest gruppe;Foster' (rekvireringsgruppe 500209) sammen med <i>Koriogonadotropin beta, Doubletest;P</i> (kvantitet 002356). Se <i>Doubletest gruppe;Foster Dok ID: 956036</i> og analysen NPU01580 <i>Koriogonadotropin beta, Doubletest;P</i>. Prøven tages i graviditetsuge 8+0 til 13+6¹		
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5	
	Minimumsvolumen	1000 µl serum (Kryptor)	
	Transportordning (Praksis)	JA	
	Holdbarhed inden centrifugering	10 timer ved 21 °C	
	Holdbarhed efter centrifugering (afpipetteres ved track og kommer på frys til analysering) ved	21°C	24 timer ²
		4°C	48 timer ²
		-20°C	6 år ²
Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed.		
Svarafgivelse	Analysen udføres dagligt på hverdage		
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed		
Referenceinterval			
Klinisk information	Måling af biomarkørerne PAPPA og HCGBETA (frit-beta-HCG) udgør sammen med måling af fosterets nakkefold første trimester screeningen for Downs syndrom og trisomi 13 og 18¹. Risikoberegning udføres med programmet ASTRAIA, når ultralydsscanning er udført.		
Variation på analyseresultater	Mål for CV% ≤ 4% Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 0,57 IU/L, CV% 2,3% Niveau ~ 2,28 IU/L, CV% 3,6% Niveau ~ 4,20 IU/L, CV% 6,3%		
Biologisk variation	Ej relevant		
Referencer	1. Sundhed.dk. Doubletest. Tilgået 17/12-2024.		

 Version	Godkendt	Revisionsinformation
1.1	08.12.2025	Ændret holdbarhed på fuldblod til 10 timer v 21 gr C
1	06.02.2025	Nyoprettet dokument