

FecalSwab til tarmpatogene bakterier, virus og parasitter

FecalSwab anvendes til undersøgelse af alle almindelige tarmpatogener som forårsager *diaré sygdom*, dvs tarmpatogene bakterier, tarmpatogene E. coli (VTEC, EIEC), Clostridioides difficile, tarmpatogene virus og tarmpatogene parasitter.

Prøvetagning

Meget enkelt: Podepinden dyppes i afføringen. Der skal blot sidde et tyndt lag fæces på podepinden.
Vigtigt: For meget afføring vil hæmme analysen. Når man har afsat prøven i prøverørets væske skal man fortsat kunne ane podepindens spids. Hvis podepindens spids ikke kan ses er der overført for meget prøve.

Vedlagt findes en prøvetagningsvejledning.

Undtagelser

- Helicobacter pylori i fæces: Send en lille klump fæces i prøverøret (brunt låg med indbygget ske).
- Orme, eosinofili, ophold i troper/subtroper eller hos immun kompromitterede. Anfør dette i indikationen og send ca. 1 mL fæces i prøverøret (brunt låg med indbygget ske).

Undersøgelser						
Tarmpatogene bakterier	Tarmpatogen E. coli	C. difficile	Tarmpatogene virus	Tarmpatogene parasitter	Tarmpatogene parasitter: orme, troper/subtrop.	Helicobacter pylori
Standard for samfunds-erhvervet diaré sygdom Ikke indiceret ved diaré opstået efter 3. indlæggelses døgn	Børn og blodig diaré	Antibiotika-associeret diaré Sygehus erhvervet diaré	Denne undersøgelse er normalt kun indiceret for indlagte patienter Sygehus erhvervet diaré	Overvejende ved udlandsrejse eller længerevarende diaré	Anfør indikation Fx: Eosinofili Ophold i troper, subtroper Immunkompromitteret	Ulcus sygdom
Campylobacter Salmonella Shigella Yersinia enterocolitica Vibrio Aeromonas	VTEC EIEC	C. difficile	Norovirus Sapovirus Astrovirus Rotavirus Adenovirus	Entamoeba histolytica Giardia lamblia Cryptosporidium	Spoleorm Bændelorme Schistosoma Fasciola Strongyloides Cyclospora cayetanensis: Anfør specifikt	Helicobacter pylori
FecalSwab	FecalSwab	FecalSwab	FecalSwab	FecalSwab	Fæces i prøverør m brunt skruelåg	Fæces i prøverør m brunt skruelåg

