

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Koriogonadotropin beta,Doubletest;P



Nyoprettet

	Koriogonadotropin beta,Doubletest;P		
LabTerms kort helterm (enhed)	P-Choriogonadotropin beta-kæde; arb.stofk.(IRP 75/551;proc.), (IU/L)		
NPU kode / kvantitet	NPU01580 / 002356		
Forkortelse og synonymer	HCGBETA, frit-beta-HCG		
Instruktion for rekvirent	<p>HCGBETA kan ikke rekvireres som enkeltanalyse. HCGBETA indgår i gruppen 'Doubletest gruppe;Foster' (rekvireringsgruppe 500209) sammen med PAPP (PAPP A;P) (kvantitet 004251).</p> <p>Se <i>Doubletest gruppe;Foster Dok ID: 956036</i> og analysen NPU22157 PAPP A;P.</p> <p>Prøven tages i graviditetsuge 8+0 til 13+6¹</p>		
Prøvemateriale	Prøverør	GUL/GEL 3,5	
	Minimumsvolumen	1000 µl serum (Kryptor)	
	Transportordning (Praksis)	JA	
	Holdbarhed inden centrifugering	8 timer ved 21 °C	
	Holdbarhed efter centrifugering (afpipetteres ved track og kommer på frys til analysering) ved	21°C	8 timer ²
		4°C	24 timer ²
-20°C		6 år ²	
Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed.		
Svarafgivelse	Analysen udføres dagligt på hverdage		
Efterbestilling	Efterbestilling, se holdbarhed		
Referenceinterval			
Klinisk information	<p>Måling af biomarkørerne PAPP og HCGBETA (frit-beta-HCG) udgør sammen med måling af fosterets nakkefold første trimester screeningen for Downs syndrom og trisomi 13 og 18¹.</p> <p>Risikoberegning udføres med programmet ASTRAIA, når ultralydsscanning er udført.</p>		
Variation på analyseresultater	<p>Mål for CV% ≤ 3%</p> <p>Intern kontrol i rutinedrift: Niveau ~ 36 IU/L, CV% 2,9% Niveau ~ 71 IU/L, CV% 2,6% Niveau ~ 139 IU/L, CV% 3,5%</p>		
Biologisk variation	Ej relevant		
Referencer	<p>1. Sundhed.dk. Doubletest. Tilgået 17/12-2024.</p> <p>2. Kit insert; B.R.A.H.M.S Free beta hCG KRYPTOR, HN-CUS-3020 version R31.1da (Kryptor).</p>		

Version
1

Godkendt
18.02.2025

Revisionsinformation
Nyoprettet dokument