

Dokumentbrugere:

SHS Bio/Im

Dokument ID:

956360

Forfatter:

Rasmus Skjold Stolberg

Udgivelsesdato:

30.10.2025

Læseadgang:

Alle

Niveau:

Instruks

Dokumentansvarlig:

SHS/Bio/Im AL

Version:

1

Godkendt af:

Anne Lindegaard
Christiansen

Udskrevet er dokumentet ikke versionsstyret.

Anæmiudredning

	Anæmiudredning (>17 år)	
LabTerms kort helterm, (enhed)	Ikke relevant	
NPU kode / Rekvireringsgruppe	RSD03346 / 500585 (må ikke anvendes til børn)	
Forkortelse og synonymer	ANÆMIUDR	
Instruktion for rekvirent	Må ikke anvendes til børn Indledningsvist udføres analyserne hæmoglobin, MCV og ferritin. Herefter sker en dynamisk rekvirering af andre relevante analyser afhængig af resultatet på foregående analyser jf. <i>flowet</i> i algoritmen. Indledende analyser: <i>Hæmoglobin;B</i> <i>Erytrocytvolumen (middel) [MCV];B</i> <i>Ferritin;P</i> Analyser der kan udløses af algoritmen: <i>Reticulocytter;B</i> <i>Haptoglobin;P</i> <i>Cobalamin, P</i> <i>Folat;P</i>	
Prøvemateriale	Prøverør	LILLA(K3)4 - EDTA + LGRØN 4,5 - LiHep
	Minimumsvolumen	LILLA(K3)4 - EDTA 2 mL LGRØN 4,5 - LiHep
	Transportordning (Praksis)	JA
	Holdbarhed	Se Laboratievejledning for de enkelte analyser, der indgår i algoritmen.
	Postforsendelse	Kan sendes i henhold til holdbarhed
Svarafgivelse	Svar afgives samme dag	
Efterbestilling	Ikke relevant	
Referenceinterval	Se Laboratievejledning for de enkelte analyser, der indgår i algoritmen.	
Klinisk information	Screening for årsag til anæmi hos voksne (≥ 18 år). Dog bør anæmiudredningen ikke benyttes hos gravide, nyresyge eller andre patientgrupper, hvor der findes særlige udrednings- og behandlingsvejledninger for anæmi. Vejledende fortolkning fremgår af <i>flowdiagrammet</i>. En udredning kan resultere i mere end en tolkning svarende til, at patienten kan have en kombineret anæmi.	
Variation på analyseresultat	Se Laboratievejledning for de enkelte analyser, der indgår i algoritmen.	
Instrument	EDTA - Sysmex LiHep - Cobas	
Biologisk variation	Ikke relevant	

Referencer	Ikke relevant
------------	---------------

 Version	Godkendt	Revisionsinformation
1	28.10.2025	Nyoprettet