

<b>Analysenavn</b>	P—Cardiolipin-antistof; arb.stofk.(liste)
<b>Kortnavn</b>	Cardiolipin-Ab gruppe;P
<b>Forkortelse</b>	CARDIOAB
<b>IUPAC - kode</b>	NPU17553
<b>Kvantitetsnummer</b>	500027

P—Cardiolipin-antistof; arb.stofk.(liste) består af følgende analyser:

<b>Analyse</b>	P—Cardiolipin-antistof(IgG); arb.stofk.
<b>Kortnavn</b>	Cardiolipin-Ab(IgG);P
<b>Forkortelse</b>	CARDIOABIGG
<b>IUPAC - kode</b>	NPU28911
<b>Kvantitetsnummer</b>	003825

<b>Analyse</b>	P—Cardiolipin-antistof(IgM); arb.stofk.
<b>Kortnavn</b>	Cardiolipin-Ab(IgM);P
<b>Forkortelse</b>	CARDIOABIGM
<b>IUPAC - kode</b>	NPU28912
<b>Kvantitetsnummer</b>	003826

**Instruktion for rekurrent** Analyseres hver 2. uge

**Prøvemateriale** 1 mL serum  
Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.

**Prøvetagning** Blodet tages i [RØD 6](#).

<b>Referenceinterval</b>	Cardiolipin-antistof(IgG)	mindre end $21 \times 10^3$ IU/L
	Cardiolipin-antistof(IgM)	mindre end $41 \times 10^3$ IU/L

**Analyseusikkerhed** 15 %

**Unormale værdier** Testen detekterer antistoffer rettet mod cardiolipin og cardiolipin-beta-2-mikroglobulin komplekser. Forhøjede værdier ses hos ca. 30 % af patienter med lupus erythematosus. Endvidere med øget frekvens ved øvrige autoimmune sygdomme, efter cerebrale infarkter og efter visse infektioner (især IgM antistof). 80 - 90 % med antiphospholipid antistof syndromet (APS) er IgG positive.

Seneste opdatering 01.08.18