

Vejledning til håndtering af vævsprøver i det formalinholdige, lukkede prøveholdersystem Monovette:

Sådan fungerer Monovette-systemet

1. **Placering:** Placer biopsi- eller vævsmateriale i det tomme forsendelsesrør.
2. **Fastgørelse:** Skru låget fast.
3. **Påfyldning:** Placer spidsen af låget i formalindispenseren. Tilsæt formalin ved at udtrække stemplet (se evt. instruktionsvideo)
4. **Mængde:** Tilsæt formalin i forholdet ca. 1:10 som minimum. Ved små biopsier behøver glasset ikke fyldes helt.

Vigtigt: Påfør korrekt patient-ID på prøverøret før afsendelse til Patologi – SHS.

Instruktionsvideo: <https://youtu.be/93LqCUI91L4>

Opsamlingsrør på hhv. 9 ml og 25 ml(anbefales)



450 ml formalindispenser



Forsendelse sker som hidtil.

Support:

Ved produktrelaterede problemer kontaktes leverandøren – **ikke** afdelingen:

Kontakt: **Hounisen**

Tlf.: 86 21 08 00

E-mail: alg@hounisen.com